

روش اجرای فرآیند استریلیزاسیون جهت نصب در اتاق استریلیزاسیون مطب:

\*\*\*نحوه استریلیزاسیون:

الف- دستیاران وسایل حفاظت فردی را می پوشند( شیلد یا عینک ،دستکش ،ماسک وپیش بند و...)

ب- ابزار و وسایل آلوده شده را ابتدا با آب ولرم(۳۰ درجه سانتیگراد) و صابون مایع شستشو داده با برس در آب پاکسازی انجام دهند.( فرآیند برس زدن بعلت پاشیده شدن آلودگی به اطراف در خارج از آب صورت نگیرد.)

پ- پس از شستشو، ابزار و وسایل را به طور کامل در مدت زمان کافی طبق دستورالعمل روی محلول گندزدا کاملا غوطه ور کنید.( وسایلی مانند قیچی و غیره که دارای محور هستند کاملا باز شود تا تمام سطوح آن در تماس با گندزدا قرار گیرد.)

ت- ابزار و وسایل گندزدایی شده پس از آبکشی با پارچه تنظیف یکبار مصرف خشک، ست و پک بندی نموده و یک عدد اندیکاتور کلاس ۶ در یکی از پک ها قرار می دهیم.

ث- ضمن درج تاریخ بر روی پک ها بصورتی که سمت کاغذی به طرف بالا باشد با حجم مناسب در اتوکلاو قرارداده پس از استریلیزاسیون در قفسه مطب جهت استفاده نگهداری میکنیم.

توجه: دقت شود بعداز خروج پک ها از اتوکلاو تغییر رنگ در اندیکاتور کلاس ۶ اتفاق افتاده باشد و نتیجه تست در دفتر روزانه ثبت شود.

واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت شهرستان داراب